


Wischdesinfektion kleiner und mittlerer Flächen

Richtiges Falten und Entfalten eines Wischtuchs.



- das hier gezeigte Verfahren nur anwenden, wenn die Tuchgröße es zulässt
- achten Sie grundsätzlich auf eine lückenlose Benetzung der Fläche
- bei Verwendung von ready-to-use-Wipes: Schließen Sie nach der Tuchentnahme die Verpackung, um ein Austrocknen der restlichen Tücher zu verhindern



1. Legen Sie Handschuhe an.

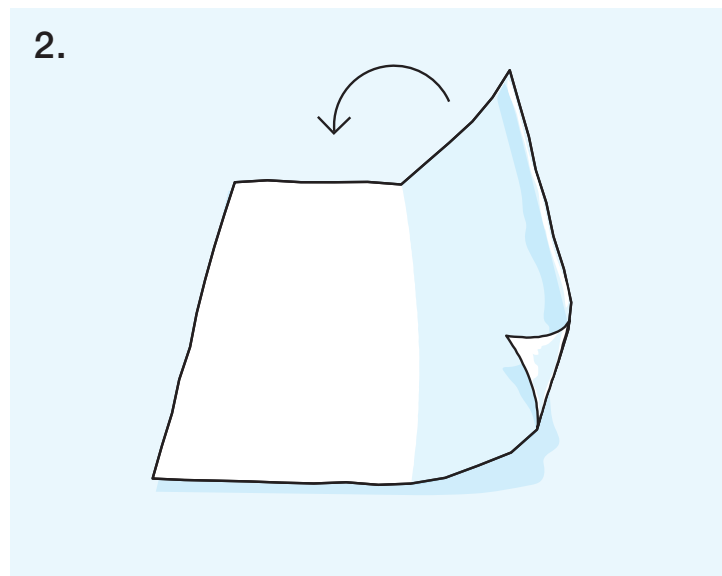


2. Falten Sie das Tuch zweimal jeweils in der Mitte.

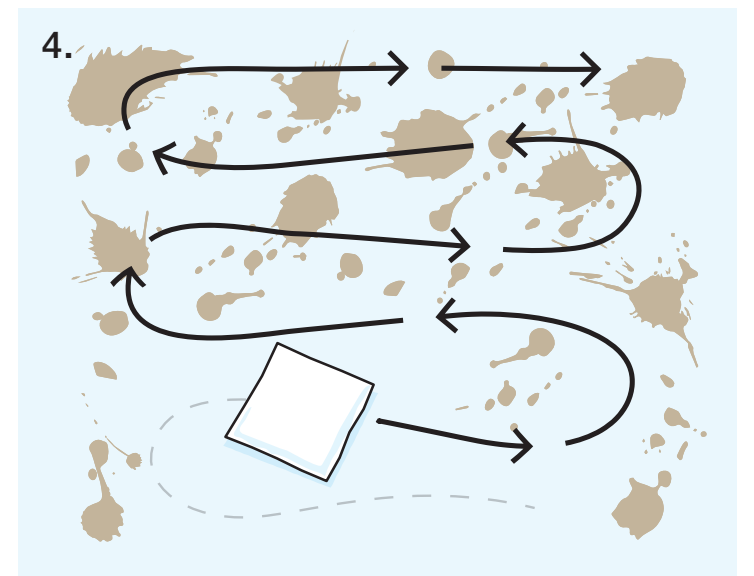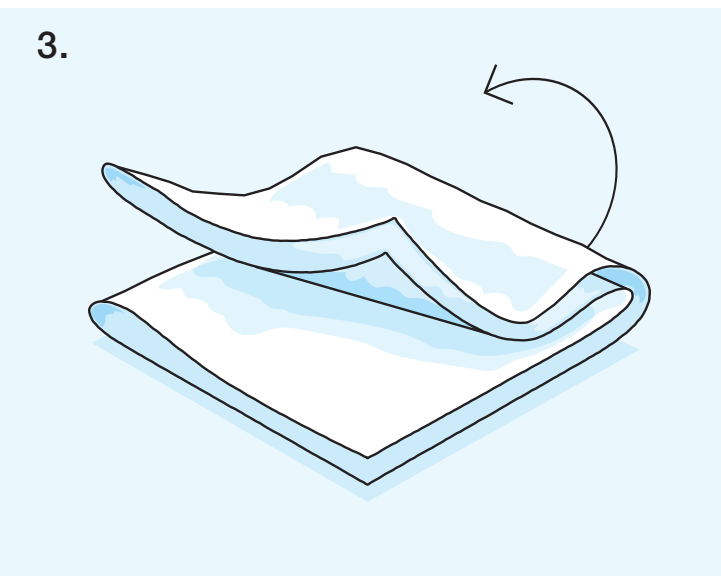


4. Wischen Sie sorgfältig und ohne Lücken über die Fläche.




5. Wenden Sie das Tuch, sodass nun die unbenutzte Seite auf der Fläche liegt.

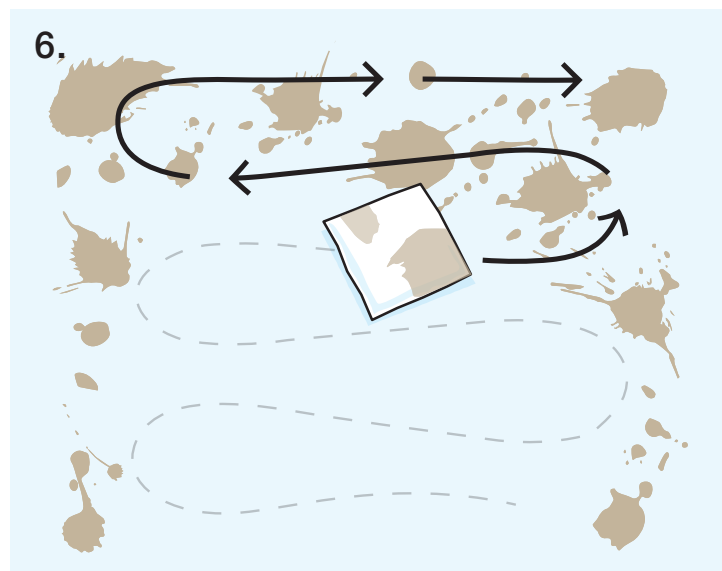


6. Fahren Sie mit der Wischdesinfektion über die Fläche fort.

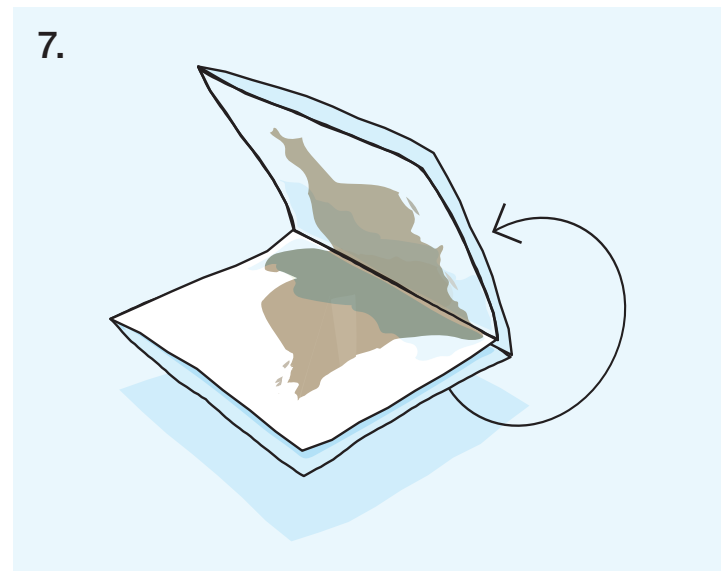



7. Entfalten und wenden Sie das Tuch einmal. Falten Sie es erneut in der Mitte, sodass nun die unbenutzten Seiten außen liegen.

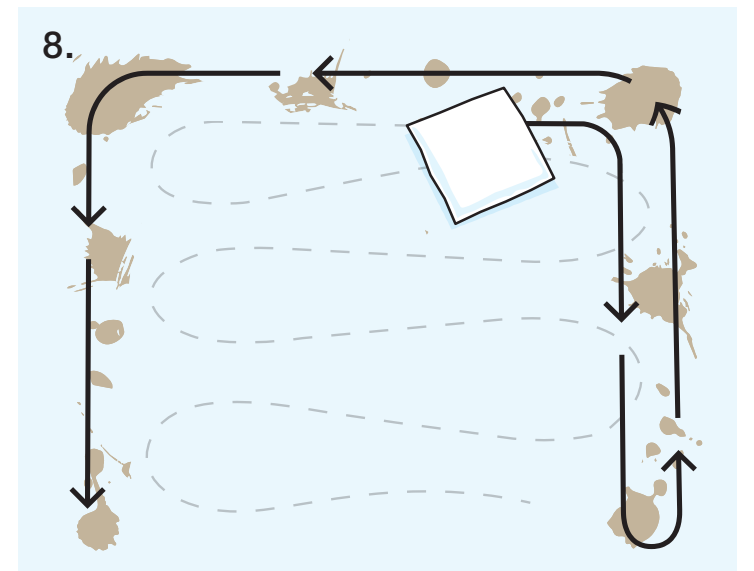

8. Wischen Sie sorgfältig über Ecken und Ränder. Dabei kann das Tuch zwischenzeitlich noch einmal gewendet werden.

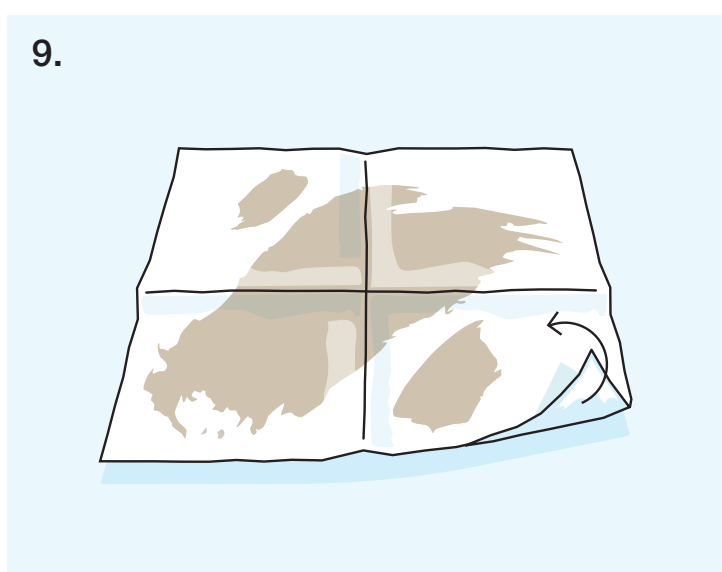

9. Entfalten Sie das Tuch vollständig, sodass alle benutzten Seiten oben liegen. Wiederholen Sie nun die Faltechnik aus Schritt 2 und 3.

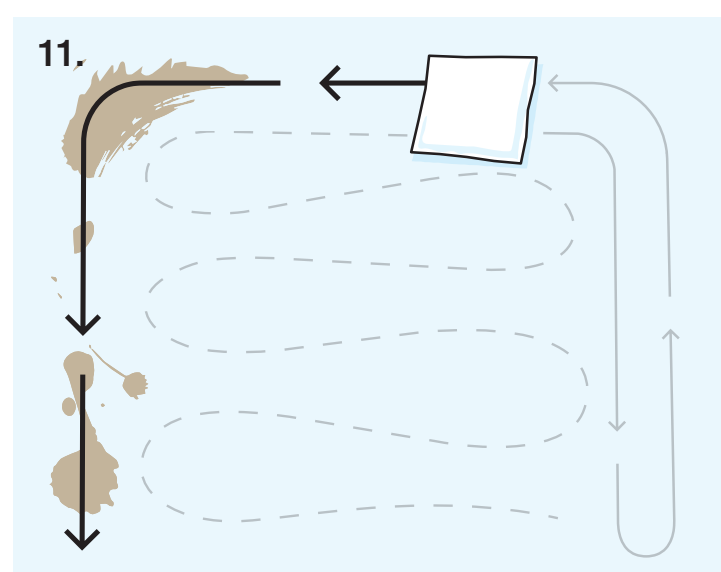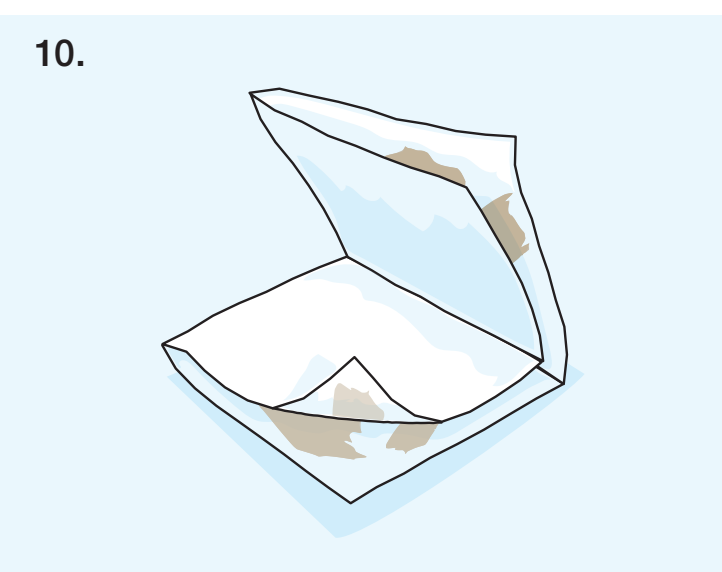

11. Fahren Sie mit der Wischdesinfektion über die restlichen Ecken und Ränder fort.



12. Entsorgen Sie Tuch und Handschuhe nach der Flächendesinfektion gemäß örtlicher Bestimmungen.



Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hier erfahren Sie mehr zu unseren L+R Flächendesinfektionsmitteln wie L+R surfacedisinfect universal und L+R surfacedisinfect alcohol.

<https://bit.ly/3hFp5SL>



Prevent & Protect
Platform for Infection Control



Besuchen Sie uns auf unserer neuen Plattform L+R Prevent & Protect und finden Sie die Antwort auf viele weitere Fragen zum Infektionsschutz.

<http://bit.ly/3VdcUu2>